

# Cavex Alginate Container

Mehrere externe Faktoren können die Qualität des Alginatabdrucks beeinflussen. Daher ist es wichtig, so viele dieser Faktoren wie möglich zu standardisieren. Der Cavex Alginatebehälter ist ein Zubehör, das Teil der Lösung zur Standardisierung externer Faktoren ist.

## Anwendung

Bewahren Sie das Alginatepulver im Behälter auf und kleben Sie den mitgelieferten Aufkleber mit dem entsprechenden Alginate auf den Behälter. Schöpfen Sie das Alginatepulver mit dem mitgelieferten Löffel aus dem Behälter. Streichen Sie den Löffel an der Seite des Behälters ab, um die perfekte Menge Alginatepulver zu erhalten.



### Einhändig

Der Alginatebehälter kann mit einer Hand geöffnet werden. Ziehen Sie den roten Taster am Deckel nach oben und entnehmen Sie mit dem innen am Deckel befestigten Löffel einen Löffel Alginatepulver.



### Luftdicht/Lichtundurchlässig

Durch die Luft- und Lichtdichtigkeit des Behälters wird eine Verschlechterung durch Licht oder Feuchtigkeit vermieden.



### Dosierlöffel

Der Dosierlöffel kann auf die Innenseite des Deckels des Behälters befestigt werden. Auf diese Weise geht der Löffel nie verloren oder wird von Alginatepulver bedeckt.

**CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN**

